

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المديرية العامة للدفاع المدني
إدارة الدراسات والأبحاث والتطوير

دليل استخدام

نقالة الإنقاذ

Rollgliss RW800

Rollgliss Rescue stretcher RW 800

الاستخدام

تستخدم نقالة الإنقاذ Rollgliss RW800 لإنقاذ الأشخاص من الأماكن المرتفعة وذلك مع وحدة الإنقاذ Rollgliss ، ويتم استخدام هذه الوحدة فقط من قبل الأشخاص المدربين لهذه الغاية .

المسؤولية القانونية

لا تتحمل أي من العلامات التجارية Rollgliss AG, Rollgliss GmbH, Rollglis أية مسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب الوحدة أو أي حادث يحدث نتيجة استخدام الوحدة لغير الاستخدامات المذكورة في دليل الاستخدام.

هام!

- ← يجب أخذ العناية الفائقة حول الملاحظات التي يحتويها دليل الاستخدام .
- ← إن عملية استخدام الوحدة مذكور في دليل الصيانة والتشغيل الخاص بها .

ظروف الاستخدام

تستخدم هذه الوحدة ضمن نطاق درجة حرارة من -30°C – 60°C ، ويجب إن لا تستخدم خارج هذا النطاق إلا أنه يمكن استخدامها حتى درجة حرارة 100°C م وذلك للحظات ، وفي هذه الحالة فإنه يجب نزع مقعد الإنقاذ وإرساله إلى Rollgliss AG أو للمدرب المختص من أجل الصيانة .

التخزين

يجب أن يتم تخزين الوحدة في وضع الوقوف بحيث لا تؤثر الظروف المحيطة على مكونات الوحدة .

Rollgliss Rescue stretcher RW 800

- أ- قاعدة النقالة .
- ب- مقابض الحمل ، طرف الرأس .
- ج- مقابض الحمل ، طرف القدم .
- د- أشرطة التثبيت .
- هـ- أحزمة التعليق .
- و- علامة النوع .
- ز- رمز الرأس .
- ح- رمز القدم .

علامة النوع

Rollgliss ® Secure-& Rescue Systems		RW 800
أقصى حمل	: ١٥٠ كغم	Art.- No:800 800
عدد الأشخاص	: ١	CE XX
سنة الصنع	: XXXX	0158
وزن الهيكل	: ٢٢ كغم	رقم المصنع
مقاييس الاختبار	: EN 1497	
لغايات الإلتقاذ فقط!		
اقرأ دليل الاستخدام جيداً!		
استعمل أشرطة التثبيت من أجل سلامة المصاب!		

تحتوي علامة النوع على سنة الصنع (XXXX) ورقم المصنع (XX) يرجى تحديد هذه العلامات في دليل الاستخدام.

Rollgliss Rescue stretcher RW 800

يتم وضع النقالة بشكل متوازٍ بجانب المصاب (ملاحظة : يجب التأكد من وضعها بشكل صحيح بحيث تدل العلامات اللاصقة على النقالة (ز و ح) على وضع القدم والرأس).
يتم وضع أشرطة التثبيت (د) وأحزمة التعليق (هـ) على الجانبين الأيمن والأيسر للنقالة .

يجب وضع الشخص المراد إنقاذه بعناية في النقالة (يمكن وضع فرشاة اختيارية رقم (800 8001 ... الخ) . يرجى الانتباه إلى علامات الرأس والقدم.

يجب تثبيت المصاب باستخراج أشرطة التثبيت (د) .

يتم رفع أحزمة التعليق (هـ) وإدخال طوق الحمل في وحدة الإنقاذ .

يتم رفع النقالة باستخدام الوحدة ويجب الانتباه إلى ان النقالة معلقة بشكل أفقي .

عند إنزال النقالة فإنه يفضل مسكها بحبل إضافي خشية الالتفاف ... الخ .

بعد إنزال النقالة فإنه يمكن نقلها باستعمال مقابض الحمل (ب ، جـ) وإخراج المصاب منها .

يتم سحب النقالة فارغة إلى الأعلى مجدداً للقيام بعملية إنزال أخرى (عندما تكون النقالة فارغة فإنه لا يشترط تعليقها بشكل أفقي .

يجب فحص الوحدة قبل وبعد كل استخراج ، ويجب أيضاً إجراء فحص سنوي من قبل الشركة (Rollgliss AG (GmbH أو Inc.) أو من قبل خبير مدرب .

يجب التأكد من الأمور التالية :-

- عدم وجود أية أضرار من أية نوع بقاعدة النقالة.
- عدم وجود أية أضرار من أية نوع بالقطع المعدنية (أكسده ، تحطم ، ..الخ).
- عدم وجود أية أضرار من أية نوع بالأحزمة والأشرطة.
- عدم تمزق أطراف الأشرطة.
- عدم تلف أشرطة التثبيت.
- عدم رؤية أية سطح زجاجي على الأشرطة.
- عدم رؤية أية تضائل في الأشرطة قد يكون ناجماً عن المذيبات أو غيرها.


هام !

- ← يجب فحص الوحدة بشكل منتظم .
- ← فحص سنوي من قبل الشركة أو خبير مدرب .
- ← يجب تغيير الأحزمة بعد (١٠) سنوات من تاريخ الإنتاج إذا لزم الأمر .

المواصفات الفنية

أقصى حمولة	:	شخص واحد أو (١٥٠ كغم) .
الأبعاد	:	٢١٠ X ٦٧ X ٢١ سم تقريباً .
وزن الهيكل	:	٢٢ كغم تقريباً .
الشهادة	:	acc. To En 1496 (CE 0158 .. (سنة الصنع)

Rollgliss Rescue stretcher RW 800

الدخول إلى الخدمة	الاستلام
التاريخ :	رقم الوحدة : ٩٢٤
التوقيع :	التاريخ : ١٩٩٨/١٠/١٦
	التوقيع : 

التاريخ:	نوع العمل المنتج:	الصيانة والإصلاح

الصيانة من قبل الشركة أو من قبل الخبير المدرب :

لاستشارة والمبيعات